

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

«Стол для санитарной обработки новорождённых «АИСТ-1»

Перед началом использования изделия внимательно изучите Паспорт изделия.

Соблюдайте следующий порядок работы:

1. Проверьте, что все колёса Стола поставлены на тормоз.
2. Включите питание Блока управления выключателем на передней панели.
3. При необходимости включите освещение выключателем на передней панели.
4. Положите датчик температуры на середину матраца.
5. Кнопками **«БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ»** задайте мощность обогрева ложа.
6. Кнопкой **«ПУСК/СТОП»** включите нагрев. При этом загорится светодиодный индикатор **«НАГРЕВ ВКЛЮЧЕН»**.
7. Индикатор температуры будет показывать текущую температуру датчика.
8. Через 10-30 минут Стол будет готов к работе. Время выхода на заданный режим зависит от заданной мощности и от температуры воздуха в помещении.
9. Положите ребёнка на матрац ложа, датчик температуры закрепите на теле ребёнка (например, лейкопластырем) за провод. Датчик должен прикасаться к телу ребёнка.

ВНИМАНИЕ!



Следите, чтобы датчик температуры Стола находился под воздействием прямого инфракрасного излучения, не закрывался простынями и другими принадлежностями.
В противном случае может произойти перегрев ребёнка.

10. По окончании работы выключите нагрев кнопкой **«ПУСК/СТОП»**, затем отключите питание Блока управления выключателем.

При санитарной обработке и длительном перерыве в работе выньте вилку сетевого шнура из розетки.

В процессе работы Блок управления проводит диагностику устройств для обеспечения безопасности пациентов. Контролируются следующие параметры:

- исправность датчика температуры;
- перегрев ложа (повышение температуры до +40°C);
- пропадание напряжения в электрической сети;
- разряд батареи аварийной сигнализации.

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправности загорается индикатор **«АВАРИЯ»**, включается звуковой сигнал. В этом случае уберите ребёнка с ложа.

Отключите звуковой сигнал нажатием кнопок **«БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ»**. Устраните причину неисправности. Если причина аварии не устранена в течение 15 минут, звуковой сигнал включится снова. После устранения неисправности нажмите кнопку **«ПУСК/СТОП»**. Для продолжения работы смотрите пункт 5 настоящей Памятки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



- запрещается подключать Стол к двухполюсной розетке без защитного заземления;
- запрещается оставлять ребёнка на ложе после проведения процедур при включенном нагревательном устройстве;
- запрещается передвигать Стол с размещённым на нём ребёнком, а также при включённой в сеть вилке шнура питания;
- запрещается оставлять без присмотра включенный в сеть Стол.